

LABOQUICK FECATESZT (székletből) használati útmutató

Gyors, megbízható diagnosztikum a rejtett emésztőrendszeri vérzések kimutatására. Csak professzionális vizsgálathoz. Vastagbélrák a harmadik leggyakoribb rák mind férfiaknál, mind nőknél, 50 év felett. Korai szakaszában tünetmentes, az egyetlen mód az észrevételére, a szkennelő, ultrahangos vizsgálatok. Emiatt 50 fölött mindenkinek ajánlott ennek a tesztnek az elvégzése. A fecal occult vérteszt meghatározza a székletvér kapcsolatát a bélrendszeri rendellenességekkel.

Elv

Az egylépcsős teszt gyors, könnyű módja a székletvér minőségi meghatározására. A teszt képes kimutatni az emberi hemoglobint (hHB) (30ng/ml) 10 percen belül.

A csomag tartalma: Tesztkazetta, cseppentő, mintavevővel ellátva, használati utasítás.

Tárolási feltételek

+4°C és +30°C között tárolandó, nem szabad fagyasztani. Ilyen körülmények között, lejárati időn belül és ha a csomagolása sértetlen - a teszt megbízhatóan működik.

Figyelem!

- ◆ Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót használat előtt!
- ◆ Az eszköz csak in vitro diagnosztikai célra készült és egyszer használatos!
- ◆ A tesztet soha ne fagyassza le! Ha hűtőszekrényben tárolja, használat előtt várjon, amíg felmelegszik szobahőmérsékletre. A tesztet mindig szobahőmérsékleten kell végezni.
- ◆ A tesztet lejárati időn túl ne használja!
- ◆ Mintának csak humán széklet alkalmas!
- ◆ Csak 3-4 csepp mintát cseppentsen a tesztlyukba!
- ◆ Amikor a tesztet kivette a csomagolásból, azonnal használja fel!
- ◆ Ha a csomagolás sérült, a tesztet nem szabad használni!
- ◆ Hogy megelőzze a minták összekeveredését, egyszer használatos cseppentőt használjon külön minden teszthez!
- ◆ Az eredményt 5-10 percen belül lehet leolvasni, a 30 perc után kapott eredményeket nem kell figyelembe venni!
- ◆ A vizsgálat alatt a vizsgált személy ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon!

Mintagyűjtés és a vizsgálat elvégzése

1. Helyezzen székletmintát egy tiszta, száraz edénybe. Csavarja le a csomagban található mintavevő tartály színes kupakját. Vigyázzon, hogy a tartályba lévő folyadék ne folyhasson ki!

2. A kupak lecsavarása után a kupakhoz rögzített pálcával úgy vegyen mintát, hogy a pálcát a székletminta 3-4 különböző pontjába belemártja.

3. Finoman távolítsa el a mintavevő pálcára tapadt felesleges mintát egy törülő ruha/papír segítségével. A mintavevő pálcá végén található rovátkákban megtapadt mennyiség elegendő a vizsgálat elvégzéséhez!

4. Helyezze vissza a mintavevő pálcát tartalmazó kupakot a tartályra és jól csavarja rá.

5. Alaposan rázza össze a tartály tartalmát, hogy a benne lévő oldat és a székletminta jól elkeveredjen. Vegye ki a tesztkazettát a fóliából és helyezze egy tiszta, vízszintes felületre.

6. Tartsa a mintatartályt a színes kupakkal felfelé és törje le a kupak csúcsát.

7. A csúcs letörése után a tartály cseppentőként működik. Fordítsa a tartályt a színes kupakkal lefelé és **cseppentsen 3-4 csepp**et a tartály tartalmából a **tesztkazetta kör alakú mintanyílásába**.


8. Az eredményt **5- 10 perc** elteltével értékelje!

Használata:

1. A teszt szobahőmérsékletű kell legyen.
2. Vegye ki a tesztet a csomagolásból, de csak közvetlenül a teszt elvégzése előtt, helyezze vízszintes felületre!

A kupak lecsavarása után a kupakhoz rögzített pálcával úgy vegyen mintát, hogy a pálcát a székletminta 3-4 különböző pontjába belemártja. Helyezze vissza a mintavevő pálcát tartalmazó kupakot a tartályra, jól csavarja rá, majd alaposan rázza össze!

3. Az oldószeres flakonból cseppentsen 3-4 cseppet a mintára!
4. A eredményt 5-10 perc múlva olvassa le!
5. 30 perc után az eredményt figyelmen kívül kell hagyni!

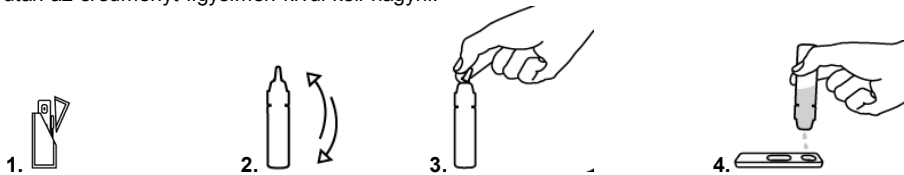

Az eredmény kiértékelése

A C betű alatt megjelenő egyetlen vonal az eredmény ablakban azt jelenti, hogy az eredmény **negatív**.



A C és T betűk alatt megjelenő vonalak az eredmény ablakban azt jelentik, hogy az eredmény **pozitív**.



Ha egyetlen vonal sem jelenik meg az eredmény ablakban a C és T betűk alatt 30 percen belül, az eredmény **érvénytelen**. Hiba történt az eljárás során, vagy a tesztkazetta hibás, a tesztet meg kell ismételni.



Forgalmazó: REXTRA Kft. 1031. Budapest, Emőd u. 38.

Tel.: +361/242-2924

Fax: +361/242-1567

www.rextra.hu

email: info@rextra.hu