

# rossmax

Modell: PF120 Csúcsáramlásmérő A/C

HU

Használati útmutató



[www.rossmax.com](http://www.rossmax.com)

## Bevezetés

A Rossmax csúcsáramlásmérő a kilégzési csúcsáramlás (PEFR) mérésére szolgál, amely fontos indikátora a tüdőfunkciónak. A csúcsáramlásmérő légzési zavarok, például asztma ellenőrzésére használandó. A napi csúcsáramlásmérés és a mért értékek lejegyzése nagy segítséget nyújthat Önnek és orvosának a kezelési terv kialakításában. Az eszköz használata és a színes mutatók beállítása a kezelőorvosa által kialakított kezelési terv alapján kell, hogy történjen. A mért értékek rögzítésére szolgáló táblázat letölthető a [www.rossmax.com](http://www.rossmax.com) honlapról. Használatkor gondoskodjon a készülék tisztántartásáról!


**Figyelem:** Tanulmányozza a mellékelt dokumentumokat. Kérjük olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót használat előtt. A saját PEFR értékével kapcsolatos további információkért lépjen kapcsolatba kezelőorvosával. Kérjük őrizze meg a használati útmutatót.

## Használat:

1. Állítsa a piros mutatót a skála aljához.
2. A méréshez álljon fel, vegyen egy mély levegőt, helyezze a vízszintesen tartott eszközt a szájába úgy, hogy az ajkai tökéletesen zárjanak.
3. Fújja ki a levegőt olyan erőteljesen és gyorsan, ahogy csak tudja. A szám, ahol a mutató megáll, a csúcsérték.

Megjegyzés: Mérés közben ne köhögjön és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nyál az eszköz belsejébe, mert ez negatívan befolyásolja a mérési eredményt.

4. Ismételje meg a fent leírt lépéseket még két alkalommal a három mérés teljesítéséhez. Jegyezze le a legnagyobb mért értéket a táblázatba.

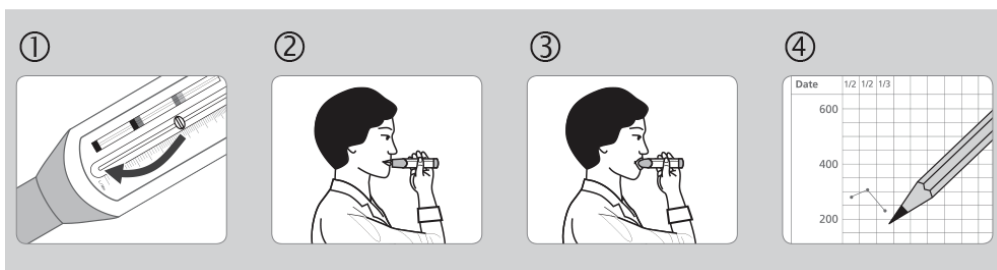

## Hibaelhárítás

Vizsgálja meg rendszeresen az eszközt a megfelelő működés biztosításának érdekében. A mozgatható alkatrészeknek megfelelően kell működniük és a mutatónak a helyén kell maradnia. Ha a megszokottól merőben eltérő mérési eredményt kap, keresse fel kezelőorvosát. Ha szükséges, lépjen kapcsolatba a Rossmax ügyfélszolgálatával. Megfelelő használat és tisztítás mellett a csúcsáramlásmérő hasznos élettartama egy évtől egészen három évig terjedhet; ezt követően cserélje ki egy újra.

## Tisztítás és fertőtlenítés

Legalább hetente egyszer tisztítsa meg meleg (nem forró) tisztítószeres oldatba való merítéssel 2-3 percig (max. 5 percig). Mozgassa meg a mutatót az alapos tisztítás érdekében. Öblítse le tiszta meleg vízzel és óvatosan rázza meg az eszközt a maradék vízcseppek eltávolításához, majd hagyja szabad levegőn megszáradni.

Tilos forró vízzel fertőtleníteni az eszközt!

### Vigyázat:

A csúcsáramlásmérő használata kezelőorvos felügyelete alatt történjen. A csúcsáramlásmérő egyetlen páciens általi használatra tervezve, egyéb esetben tisztítsa meg alaposan és használjon egyszerhasználatos szájcsumorát.

## A mért érték rögzítése

Az eszközzel egyszerű az asztma kezelési tervének betartása. Az orvosa egyénre szabottan beállítja Önnek a színes mutatókat a normálértékei alapján.

Megjegyzés: Ne változtassa meg a színes mutatók pozícióját! Ha ez véletlenül mégis megtörténne, lépjen kapcsolatba kezelőorvosával. Mérést naponta kétszer (reggel és este) végezzen, vagy a kezelőorvosa utasítása szerint. Amikor belefúj az eszközbe, a mutató a csúcsáramlási értékre fog csúszni. Ez az érték az alábbi három zóna egyikére esik:

Zöld: Tartsa magát a kezelési tervhez és végezze nyugodtan napi tevékenységeit (80-100%).

Sárga: Figyelem, az egészségügyi állapota súlyosbodott. Kövesse az orvos utasításait a zöld zónába való visszatéréshez (50-80%).

Piros: Sürgősen forduljon orvoshoz (kevesebb, mint 50%).

Mérési tartomány	PF120 A : 60-800 L/perc BTPS PF120 C: 50-400 L/perc BTPS
Pontosság	$\pm 10$ L/perc vagy $\pm 10\%$ mért érték (amelyik nagyobb)
Ismételhetőség	$\pm 5$ L/perc vagy $\pm 5\%$ mért érték (amelyik nagyobb)
Tárolási feltételek	10-35 °C, 30-75% RP
Max. ellenállás	0.00384 kPa/L/perc @ 720 L/perc
Magaslati hatás	5%-kal csökkenti a leolvasott értékeket 1000m-ként, (a csökkentett levegősűrűség növeli a PEF-kb. 1000 m-ként 5%-kal)
Frekvenciaválasz	Profil A/B különbség kevesebb, mint 15 L/min vagy 15% (amelyik nagyobb)

## Jótállási jegy

A 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet előírásai alapján cégünk az egyes fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról szóló rendeletnek megfelelően a vásárlás napjától számított alább megjelölt jótállást és 24 hónapra szavatosságot vállal. A vásárlás napján a Forgalmazó és a Vásárló között Fogyasztási szerződés keletkezik. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti. A jótállás a fogyasztó a törvényből eredő jogait nem érinti. A szerződés szempontjából a fogyasztó a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból a forgalmazóval szerződést kötő személy. A jótállási idő elteltével a vásárlónak kell bizonyítania a hiba gyári eredetét. A reklamáció esetén a kereskedelmi egységben vagy a forgalmazónál jegyzőkönyvet kell felvenni a hibáról ill. a vásárló igényéről. A hiba elhárításának módjai: a./ javítás, b./ csere, c./ árleszállítás, d./ vételár visszafizetés, ebben a sorrendben. Javítás esetén törekedni kell arra, hogy a termék javítása legfeljebb 15 napon belül befejeződjék és az a fogyasztónak jelentősebb kényelmetlenséget ne okozzon. Szennyeződéstől megtisztított terméket szabad javításra átadni. A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, ill. a javító szolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, a hiba okát a javítás módját, a megjavított termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, a jótállás a javítás időtartamával meghosszabbított új határidejét. A jótállást kizáró feltételek változatlanul érvényesek. A szavatossággal kapcsolatos jogokat a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza újra. Nem vonatkozik a jótállás a nem rendeltetésszerű használatból, valamint a külső fizikai behatásokból eredő meghibásodásokra.  
Forgalmazó: Rextra Kft. 2000 Szentendre Rózsa u. 16. Tel.: 06 26 309-109

Szerviz: Rextra Kft. 1031 Emőd u. 38.

Jótállás ideje:                      hó                      Gyári szám:

A vásárlás időpontja:                      Aláírás, bélyegző: