

(H) Egyszer Használható Önfelszívó Részecskeszűrő Légzésvédő Szájmaszk

Szűrési hatékonyság $\geq 95\%$

Fő anyagok: Nem szőtt anyag, olvadtívott szűrőanyag

Megfelelőségi szabvány: GB2626-2006

Szűrési osztály: KN95

Csomagolás: 2db / zacskó, 50 db / doboz

Megjegyzendő pontok:

- Nem véd: mindenféle gáz és gőz, olajos részecskék (például olajos füst, olajos köd, aszfaltfüst) ellen; nem ajánlott füstölésre (például hegesztőfüst vagy füstöntés); nem használható mérgező gázok környezetében.
- A védőmaszk nem képes oxigént előállítani, és nem használható oxigénhiányos környezetben.
- Nem ajánlott a terméket rossz levegőáramlásban, gyenge légzéssel vagy alvás közben használni.
- Nem alkalmazható alacsony tüdőkapacitású emberek által.
- Kérjük rendeltetésszerű használatát, hogy elkerülje a nem megfelelő használat által okozott súlyos következményeket.
- Száraz és szellőző helyen tárolandó (hőmérséklet $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 30\text{ }^{\circ}\text{C}$, relatív páratartalom: $<80\%$).
- A maszkok eldobhatók (csak egyszer használhatók) és nem moshatók.

Viselés módja:

- Nyissa ki a csomagolást, vegye ki a maszkot és nyújtsa ki!
- Helyezze a maszk sarkát kívülrre, a maszk belső oldalát az arcára!
- Húzza a fülpántot a fül mögé, és állítsa be a fülpántot úgy, hogy a lehető legkényelmesebb legyen!
- Takarja le a maszkot a kezével és lélegezzen be! Ha úgy érzi, hogy levegő távozik a széleknél, állítson a fülpánt szorosságán.



Illusztráció a viselés módjáról.