

BELLAVITA kádlift

Használati utasítás




bellavita
▪ Bathlift

CE

REXTRA
ORVOSI MŰSZER KÉSZKÖZELMI KFT.

Áttekintés

A kádlift segítséget nyújt mindennapi higiéniahoz. Azok számára fejlesztették ki, azok részben, vagy egészében akadályozottak fizikailag a fürdésben. A termék célja, hogy segítséget nyújtva az önálló életvitelhez szabadságot és intimitást adjon.

A kádlift fel és le mozgatja a beteget a fürdőkádban, valamint kényelmes hátradőlést biztosít. Akkor javasolt, ha a ki- és beszállás, valamint a kádba való beülés és kádból felállás nehézséget jelent.

I osztályú orvostechnikai eszköz, amely megfelel a 93/42/EEC irányelveknek.

A HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, VALAMINT KÉRJE KI ORVOSA, ÁPOLÓJA VÉLEMÉNYÉT!

Fontos információk:

- Soha ne használja a kádliftet a kádba történő be- és kimászásra segédeszközként. Ne használja a liftet állványként, emelőszerkezetként, támasztékként és hasonló funkciókban a lakásban. A liftet kizárólag a kádban történő használatra fejlesztették ki.
- Az állatokat tartsa távol a készüléktől.
- Soha ne javítsa önmaga a készülékez meghibásodás esetén, hanem keresse fel legközelebbi partnerét.
- Csak akkor emelje, vagy süllyessze a liftet, ha a háttámlát függőleges pozícióba állította és biztosította.
- Hőforrás közelébe ne állítsa a készüléket!
- Szállítás előtt győződjön meg, hogy a távirányítót eltávolította-e!
- Amennyiben hidegben történik a szállítása, akkor használat előtt várja meg, amíg a készülék teljesen átmelegszik szobahőmérsékletre.
- Amennyiben fürdőolajat, vagy sót használ, körültekintően az ajánlott mennyiséget használja csak a vízben, különben a készülék alkatrészeinek megcsúszásához vezethet.
- Ecetsavas tisztítószer soha ne használjon a lift tisztításához.

Az akkumulátorral és a távirányítóval kapcsolatos információk:

- a távirányítót kizárólag a lift mozgatására használja
- a liftet csak az eredeti távirányítóval használja
- soha ne helyezze a távirányítót sugárzó meleg, hőhatás közelébe
- ne szedje szét a távirányítót, mert a készülék meghibásodásához és a garancia elvesztéséhez vezethet
- csak az eredeti töltőt használja az akkumulátor töltéséhez
- A töltőt csak a kádon kívül, száraz helyiségben használja.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: AZ AKKUMULÁTORT TELJESEN TÖLTSE FEL AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT!

- Amennyiben nem használja a kádliftet hosszú ideig, akkor 3 havonta töltse fel az akkumulátort azért, hogy annak élettartalma ne csökkenjen.
- Ne dugjon áramvezető tulajdonságú eszközt a jackdugóba.
- Tisztítás előtt a távirányítót húzza ki az aljzatából.
- A távirányítót csak száraz ruhával tisztítsa.
- A kádlift erős anyagokból készült, de ütődésre megsérülhet. Amennyiben erre utaló jelet észlel, azonnal forduljon a szakkereskedőhöz.

Fontos biztonsági szabályok

- A használat megkezdése előtt helyezkedjen a lift középső részére, dőljön hátra a háttámasznak, lábait kissé egyenesítse ki és egyik kezével kapaszkodjon a kád szélében.
- A lift mozgásáig kapaszkodjon a fürdőkád oldalában.
- Fogycékos személy esetében a használat csak kísérő személy jelenlétével ajánlott.
- Használat megkezdése előtt végezzen próbamozgatásokat, hogy a lift megfelelően működik-e.
- Ne hagyjon a vízben olyan tárgyat, amely a meghibásodást okozhat a liften (pl. fogkefe), beszorulhat a készülék tartószerkezetébe.

Elektromos biztonsági nyilatkozat

A készülék megfelelő a Európai Unió tagállamaira ajánlásként tett EMV, IEC 60601-1-2, 89/336/EWG irányelveknek. A környező elektromágneses jelenségek a készülék használatát igen kis valószínűséggel képesek megzavarni. Ennek ellenére előfordulhat, hogy néhány készülék használata (pl. mobil telefon) átmeneti zavart eredményez. Ennek ellenére tartsa távol a lifttől az összes, az életre is veszélyes elektromos eszközt. Amennyiben ennek ellenére zavart észlel a készülék működésében, kérje a szakterekedő tanácsát.

Kicsomagolás

Kérjük győződjön meg, hogy a csomag tartalmazza-e az alábbi elemeket:

1. lift, háttámla és távirányító
2. ülő lap az oldalszárnyakkal
3. akkumulátor töltő
4. használati utasítás
5. az alaplapon elhelyezett 4 db, 75 mm átmérőjű tapadókorong

Bármelyik rész hiányát, vagy sérülését észleli, jelezze a kereskedőjének.

Először a töltőt csomagolja ki, majd az összes többi egységet. Őrizze meg a termék dobozát a későbbi esetleges szállítás miatt. **Figyeljen rá, hogy a használat megkezdése előtt teljesen töltsen fel az akkumulátort.** Ehhez olvassa el az akkumulátor töltéséről szóló részt.

Kádba való behelyezés

Hegyezze a 4 tapadókorongot a lift aljára. A korongok füleit úgy fordítsa, hogy jól hozzáférjen, ugyanis ezek segítenek a lift könnyű eltávolításához.

Figyelmeztetés

A szívó korongokat szilárdan jól illeszkedően helyezze el a lift alján, mert csak ekkor fogja tudni kivitelezni a tisztítást és szárítást megfelelően. Elszennyeződés esetén általános tisztítószerszerrel lehet a korongokat megtisztítani.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a kád tiszta és szennyezés mentes. Helyezze a kádliftet az üres kád aljára, majd győződjön meg arról, hogy a tapadókorongok jól illeszkednek a lifthez és a kádhoz egyaránt. A biztonságosabb tapadás érdekében még kettő, azaz összesen 6 db tapadókorong helyezhető el a lift alján.

Helyezze el a vezérlőegység hátlap integrált egységet a hordozó alap egységre.

Fogja meg a háttámlát a felső részen elhelyezett markolatánál fogva, majd a másik kezével segítve döntse hátrafelé az ellenállásig (a kép szerint).

FONTOS: mindkét vezető csap helyezkedjen megfelelően a kialakított helyén el.

- 1 – fogantyú
- 2 – fogadóegység
- 3 – csap

Ez követően bizonyosodjon meg, hogy a háttámla biztos pozícióban van.

Csatlakoztassa a távirányítót a lifthez. Nyomja rá az aljzatot a jackdugóra addig, amíg a jackdugó alján elhelyezett piros jel el nem tűnik.

Amennyiben a háttámla hátradöntését zavarja a kád, helyezze előrébb a kádlift alját.

Ez követően ellenőrizze, hogy az emelő rudazat megfelelően van-e pozícionálva.

A takaró felhelyezése és eltávolítása

A takaró felhelyezése és eltávolítása könnyen kivitelezhető. Helyezze a takarót a háttámlára és bújtsa át a markolat nyílásán. Pattintsa be a rögzítő csapot a furatába. Ugyanígy járjon el az ülés erre kialakított részein is. A takaró eltávolításához emelje meg a rögzítő gomb körül a szövetet két kézzel. A kádlift használható takaró nélkül is.

A fejtartó felhelyezése (opcionálisan vásárolható meg)

Helyezze be a fejtámasz két rúdját a háttámasz erre kialakított furataiba. Állítsa be a fejtámaszt a kívánt magasságba.

Gombok kiosztása:

1. süllyesztő gomb (a lift süllyed)
2. sürgősségi kikapcsoló gomb (vörös)
3. kontroll LED lámpa
4. emelő gomb (a lift emelkedik)
5. bekapcsoló gomb (zöld)

A használó súlyától függően maximum 6 fürdéshez elegendes egy feltöltéssel az akkumulátor. Fürdés alatt a zöld színű LED lámpa jelzi a működést. Amennyiben a gyártó által meghatározott szint alá esik az akkumulátor feszültsége a lámpa narancssárgára vált és lassan villogni kezd. Azt jelzi a készülék, hogy már csak 1 fürdés kivitelezésére elég energia van az akkumulátorban és javasolt a töltés.

Amennyiben még is a liftet tovább használja, úgy a lámpa fénye vörösre vált és villogni kezd. Ekkor a liftet már csak felfelé lehet mozgatni, ezzel biztosítva a kiszállás kivitelezését. Ekkor az akkumulátort feltétlenül tölteni kell.

ZÖLD FÉNY: a lift készen áll a működésre

NARANCS FÉNY: csökkent telepfeszültség, már csak egy fürdésre elegendő energia áll rendelkezésre

VÖRÖS FÉNY: a telep lemerül – a liftet már csak emelni lehet. Töltés szükséges.

Sürgősségi gomb

Bármely esetben, amikor a lift azonnali megállítása szükséges, nyomja meg a piros, sürgősségi gombot. Az újraindításhoz nyomja meg a zöld bekapcsoló gombot.

A kádlift automatikusan kikapcsol 30 percnyi állás után. Amennyiben Ön szeretné kikapcsolni a készüléket, akkor nyomja meg a vörös gombot.

A lift használata a kádban

1. A használat előtt győződjön meg róla, hogy a távirányító megfelelően van csatlakoztatva a készülékhez. A jackdugó vörös gyűrűjét nem szabad látni, ha megfelelően van csatlakoztatva. Kapcsolja be a zöld bekapcsoló gombot. Ekkor a LED zölden világít.
2. Nyomja meg a felfelé mozgató gombot és tartsa lenyomva ameddig a lift teljesen fel nem emelkedik a legfelső pozícióba és leáll. Ez alatti magasság is választható, ekkor a kívánt magasságban engedje el az emelő gombot.
3. Hajtsa ki az ülés szárnyait a kád szélére. Mozgassa a liftet addig a pozícióig, hogy a szárnyak az üléssel egy magasságban legyenek.
4. Üljön rá a liftre és csússzon az ülés közepére.
5. Engedje le a liftet a süllyesztő dombbal. Amikor a lift elérte a legalsó pozícióját, a háttámla elkezd dőlni. A háttámla addig dől amíg a gombot nyomva tartja, vagy elérte a leghátsó pozícióját (50 fok). FIGYELEM: ha a háttámla elérte a kád hátsó falát, azonnal engedje el a gombot.
6. Fürdés után nyomja meg az emelő gombot és emelje fel a liftet a kád felső szintjéig.
7. Csússzon ki az ülésről a kád szélére és szálljon ki.

A kádlift magától kikapcsol kb. 30 perccel a bekapcsolást követően. Újra indításhoz nyomja meg a piros gombot.

A lift mozgatásakor a kezét helyezze az ölére, vagy a combjára.

Amennyiben a liftet a kádban hagyja, távolítsa el a távirányítót, nehogy azt víz érje.

A lift eltávolítása a kádból:

Engedje le a kádliftet a legalsó pozíciójába és a háttámlát is döntse a leghátsó pozícióba.

Figyeljen rá, hogy a kád hátsó fala ne akadályozza a lift mozgását!

1. hajtsa be az ülés oldalszárnyait
2. használja a kialakított markolatokat a lift mozgatásához
3. győződjön meg róla, hogy a emelőrúd teljesen visszahúzódott
4. Ez követően távolítsa el a háttámla rész az ülőlapról. FIGYELEM: a háttámla csak bizonyos pozícióba állítva távolítható el. Teljesen lehajtva nem távolítható el! Az alsó képen látható pozícióba hozza a háttámlát és ezt követően távolítsa el.

5. A tapadó korongok nyelvét húzva távolítsa el az aljzatot a kádból. Ha netán az elülső korongok a kádba tapadnak, azt később könnyedén el tudja távolítani.

Kádlift tárolása

A kádlift karbantartás mentes, nincs szükség külön kenésre, olajozásra.

12 havonta javasolt átnézni a lift alkatrészeit, főként a teherhordó részeket, hogy nem érte-e sérülés. Az átnézés része legyen a teljes funkcionális teszt is. Amennyiben meghibásodást észlel azonnal jelezze a szerviznek, kereskedőjének.

Tisztítás

A kádlift megfelelő karbantartásához hozzátartozik, hogy fürdést követően tisztítsa meg. Többnyire elegendő a meleg vízzel történő lezuhanyozás. Amennyiben erősebb szennyeződést éri a liftet, akkor használjon általános tisztítószer.

Üléstakaró karbantartása

Az üléstakaró erre kifejlesztett nagyon sima felszínű és antibakteriális tulajdonságú anyagból készült. Időszakos tisztítás akár kézzel, akár 60 fokos gépi mosással végezhet. A mosáshoz nem enzimátikus tulajdonságú tisztítószer használható csak. Fürdőolajok, vagy egyéb fürdőszerekhez adott anyagok a takaró elszíneződését okozhatják. Az elszíneződés normál használat mellett is bekövetkezhet. Ez a kádlift funkcióját nem befolyásolja és nem tartozik garanciális körbe.

NE FELEDJE:

- a takaró könnyen eltávolítható a tisztításhoz
- ne szárítsa a takarót elektromos szárítóban
- általános tisztítószer alkalmas a tisztítására

A töltő karbantartása

A töltő nem igényel karbantartást. A tisztítást oldószer mentes, közepes erősségű detergenssel és puha ruhával végezze. Víz ne jusson be a töltő belsejébe. Újra használat előtt győződjön meg, hogy a töltő teljesen kiszáradt.

A tárolt akkumulátor töltése

Mindig győződjön meg, hogy az akkumulátor feltöltötte-e teljesen használat előtt. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség 220V.

1. dugja össze a töltőt és a távirányító megfelelő részét
2. dugja be a konnektorba a töltőt. A távirányító piros lámpája világítani kezd és zöldre változik, ha a töltés megtörtént. A teljes töltési idő kb. 4 óra. A töltő automatikusan megszakítja a töltést kb. 4 óra elteltével, azért, hogy a túltöltést megakadályozza.
3. távolítsa el a töltőt a konnektorból
4. válassza le a töltőt a távirányítótól

FONTOS:

- amennyiben a kontrol lámpa nem világít a hálózatba való bedugáskor, akkor ellenőrizze, hogy a töltő és a távirányító kapcsolata megfelelő

- a töltőt csak száraz helyiségben használja, fürdőszobában soha sem

Szállítás

1. mindig távolítsa el a távirányítót a szállítás előtt a készülékről
2. fixen rögzítse a szállítás alatt a kádliftet
3. amennyiben hideg közegben történik a szállítás, akkor újra használat előtt az akkumulátort engedje felmelegedni szobahőmérsékletre
4. az ülőrész súlya 5,5 kg, a vezérlő háttámla rész súlya 3,8 kg
5. a képen látható módon a kádlift egyben és szétszerelt állapotban is szállítható

Technikai adatok

| | |
|---------------------------------|------------|
| Teljes hossz: | 830 mm |
| Teljes szélesség: | 700 mm |
| Ülőlap szélesség: | 350 mm |
| Ülőlap mélysége: | 420 mm |
| Az ülőlap teljes hossza: | 570 mm |
| Ülőfelület minimális magassága: | 60 mm |
| Ülőfelület maximális magassága: | 480 mm |
| Háttámla hossza: | 640 mm |
| Háttámla szélessége: | 320-360 mm |
| Háttámla dőlésszöge: | 10-50 fok |
| Aljzat szélessége: | 310 mm |
| Aljzat hossza: | 560 mm |
| Maximális terhelhetőség: | 140 kg |
| Teljes súly: | 9,3 kg |
| Távirányító súlya: | 0,4 kg |
| Vezérlőegység súlya: | 3,8 kg |
| Ülőbázis súlya: | 5,5 kg |
| Egy emelési ciklus ideje: | 50 mp |
| Működési feszültség: | 12 V |

Automatikus kikapcsolás: max 30 perc

Teljesítmény: 90 W, 12 V

Működési környezeti hőmérséklet: 10-50 fok

Szállítási környezeti hőmérséklet: -10 - +40 fok

Garancia: 24 hó