

A kerekesszék használati útmutatója



●Leírás

Váza krómozott acélszövből, az ülő- és hátrész erős nylon textíliából készült. Kartámlája párnázott.

Leszerelhető ruha és lábtartó.

Kerekei tömör gumiból készülnek.

Kisebbik, első kerekek átmérője: 200 mm

Nagy, hátsó kerekek átmérője: 600 mm

Összecsukható.

Ülőszélesség: 400 mm

Ülés mélysége: 450 mm

●Tárolás

●A kerekesszék korrózió- és időjárásálló anyagokból készült, nem igényel semmilyen speciális tárolást, de ajánlott fedett helyen tárolni, portól, piszoktól védeni, így biztosított a maximális hatékonysága a működtetés során.

Karbantartás, tisztítás

Periodikus karbantartás

Ha a kerekesszék időközben megkopik vagy sérül, helyezze használaton kívülre addig amíg megjavíttatja, semmiképp ne használja hibásan vagy sérülten. A rutin karbantartási műveletek gyakorisága a használat intenzitásától függ:

Általános felülvizsgálás és az egyes szerkezetek funkcionális ellenőrzése: (1,3 ill. 6 havonta)

Tisztítás, fertőtlenítés: lásd következő pont.

Olajozás: lásd következő pont (1,3 ill. 6 havonta)

Tisztítás

Tisztítást, fertőtlenítést szükség szerint kell végezni. A fém és műanyag alkotórészeket le kell mosni és fertőtleníteni egy vízbe ill. fertőtlenítőbe mártott szivaccsal, majd alaposan leöblíteni. Minden esetben kerülje az agresszív anyagok (pl. fehérítők, ammónia) ill. dörzsölőszerek (kefe, késpenge, acélforgácsvatta) használatát.

Olajozás

Kenjen vízlepergető zsírt az elülső és hátsó kerekek csapágyaira.

Gyártó:

JIANGSU NEW ERA INDUSTRIAL & TRADE CORP.

402# EAST ZHONGSHAN ROAD, NANJING

Forgalmazó és szerviz:

Rextra Kft.

2000 Szentendre, Rózsa utca 16.

Telefon: 06-26-309-109

